

# INSTRUKCJA

Naciśnij przycisk Wł/Wł 2 razy, aby ustawić tryb pracy

Naciśnij przycisk C/F, aby zmieniać tryb pracy: BOD - pomiar temp ciała, COU - licznik, SUR - pomiar temp. obiektów



BOD



COU



SUR

Naciśnij przycisk Wł/Wł 3 razy, aby ustawić progi alarmu dla temperatury

Naciśnij przycisk C/F, aby zmieniać temperaturę alarmu od 36.0 °C do 39.0 °C



36.0



39.0

Naciśnij przycisk Wł/Wł 4 razy, aby ustawić głośność

Naciśnij przycisk C/F, aby zmieniać głośność od U0 do U4



U 0



U 4

Naciśnij przycisk Wł/Wł 5 razy, aby zmienić język komunikatów

Naciśnij przycisk C/F, aby zmieniać język: CH - Chiński, EN - Angielski, KN - Koreański, Pt - Portugalski, ES - Hiszpański, OFF - Wyłączone



CH



EN



KN



Pt



ES



OFF

Naciśnij przycisk Wł/Wł 6 razy, aby zmienić ilość środka dezynfekującego

Naciśnij przycisk C/F, aby zmieniać czas podawania płynu dezynfekującego od 0.1s do 2.0s



E0.1



E2.0

Naciśnij przycisk Wł/Wł przez 2s lub dłużej, aby wyłączyć urządzenie